



Veiligheidsinformatieblad.



Deze aanwijzingen altijd opvolgen!

Uitgave: mei 2014

Gebruiksdoel

Deze krukken zijn bedoeld als hulpmiddel voor personen die als gevolg van een handicap of aandoening problemen hebben met lopen. De krukken dienen ervoor om steun en stabiliteit te geven tijdens het lopen.

Waarschuwing tegen ongeoorloofde wijzigingen

Gebruik de krukken alleen in de originele uitvoering. Breng zelf geen wijzigingen aan door zagen, boren of anderszins.

Zorg voor de juiste instellingen

Laat u assisteren door een deskundige als u de krukken instelt voor het eerste gebruik. Volg de aanwijzingen op de achterzijde van dit blad en verzeker u ervan dat de instellingen binnen het aangegeven bereik zijn. Zorg ervoor dat alle verstelpunten goed vast zitten. Let op dat de knopjes van de lengte-verstelling goed door de gaatjes van de buitenste buis steken.

Onderhoud en controle

Controleer voor u de krukken gebruikt of ze onbeschadigd zijn. Let goed op slijtage aan de dop en de gaatjes van de lengte-verstelling. Controleer ook op scheurtjes, losse onderdelen, ingedrukt schuim en scheuren in of slijtage van het materiaal van de handgrepen. Verzeker u ervan dat de dop stevig vastzit aan de buis, zodat deze niet onverwacht losraakt tijdens het gebruik. Maak er een gewoonte van om uw krukken regelmatig te controleren op slijtage.

Onderdelen

Wanneer u onderdelen nodig hebt voor uw smartCRUTCH™ zal uw leverancier u graag van dienst zijn.

Gebruik op gladde ondergrond en trappen

Gebruik de krukken niet op erg gladde oppervlakken, zoals natte tegels, modder of ijs. U loopt dan het risico te vallen met – extra – letsel als gevolg.

Trap-op lopen: plaats eerst de voet van uw goede been op de volgende trede en verplaats de krukken pas naar die trede als u goed in balans staat.

Trap-af lopen: plaats eerst de krukken op de volgende trede en verplaats de voet van uw goede been pas naar die trede als u goed in balans staat.

Beperkingen

Bij normaal gebruik is de smartCRUTCH™ geschikt voor gebruikers van max. 120 kg en met een lichaamslengte tussen 1,52 m en 1,95 m

Bewaren

Stel de smartCRUTCH niet bloot aan extreme weersomstandigheden. En ook niet langdurig aan zonlicht. Dit geldt ook voor zonlicht dat door een raam naar binnen schijnt.

Garantie

De garantietermijn op smartCRUTCH™ bedraagt 2 jaar. Normale slijtage en schade door onjuist gebruik of opslag vallen niet onder de garantie.

REF FG.SMA/WALKAID






Manufactured by
Respitek (Pty) Ltd
75 5th Street,
Wynberg,
Sandton, 2090,
South Africa.

CE EC REP
DMS Limited
9 Felthambrook Ind. Estate
Felthambrook Way
Feltham
Middlesex
TW13 7DU
England

In gebruik nemen van de smartCRUTCH™



1. Neem de smartCRUTCH™ krukken uit de verpakking.
2. Draai de ronde vleugelmoer (A) zo ver los dat de elleboogsteun vrij kan bewegen. (Fig. 1)
3. Stel de onderarmsteun (B) in op ca. 45°, zoals aangegeven (Fig. 2). Verzeker u ervan dat de tandjes van de verstelling goed in elkaar grijpen. U heeft nu een goede beginpositie voor het gebruik van de smartCRUTCH™. U kunt deze hoek steeds naar wens aanpassen om de druk op de armen en de handen te verminderen. (N.B. in bepaalde standen is de kruk stabielere dan in andere.)
4. Plaats uw onderarm in de elleboogsteun, zoals afgebeeld (Fig. 3).
5. Draai de vleugelmoer van de verstelling van de handgreep los en trek het boutje eruit. Verschuif de handgreep zo dat uw elleboog goed in de steun rust. Steek het boutje weer in de armsteun, breng de vleugelmoer aan en draai deze goed vast (Fig. 4).
6. Ga rechtop staan, terwijl u de krukken vasthoudt alsof u ze gebruikt.
7. Stel de smartCRUTCH in op de juiste lengte in (Fig. 5).
8. De lengte is juist ingesteld als de dop van de smartCRUTCH op de grond steunt en de elleboog licht in de elleboogsteun rust.
9. Herhaal dit met de andere kruk. Let er goed op dat de knopjes van de lengte-instelling goed door de gaten in de buitenste buis steken.
10. Als u bij het gebruik van de smartCRUTCH pijnlijke druk ervaart in de handen of onderarmen kunt u de hoek van de onderarmsteun verstellen naar een positie die prettiger aanvoelt (Fig. 2). Mogelijk moet u dan wel de hoogte aanpassen.

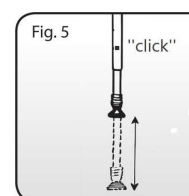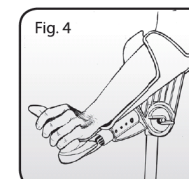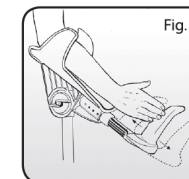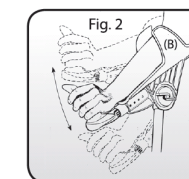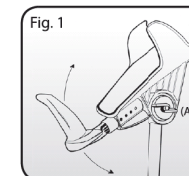

Importeur voor de Benelux: Cemex BV – Nieuwegein - NL

www.cemex.nl

www.smartcrutch.nl